

Кресло-коляска инвалидное

ЭкзоСит

Руководство по эксплуатации



Организация-производитель:

ООО «Экзо Технологии» ИНН 7743261622

125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, строение 2,
помещение II, комната 13.

Организация-разработчик:

ООО «Экзо Технологии» ИНН 7743261622

125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7а, строение 2,
помещение II, комната 13.

Адрес места производства:

400011, город Волгоград, улица Электролесовская, дом 55.



ВНИМАНИЕ!

- Производитель несет ответственность за оборудование, приобретенное у прямого представителя ООО «Экзо Технологии».
- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- Кресло-коляска предназначено для индивидуального использования с помощью сопровождающего лица.
- Используйте кресло-коляску только на ровной и твердой поверхности.
- Перед посадкой в кресло-коляску и пересаживанием из нее, убедитесь, что колеса зафиксированы, не ставьте пользователя на подножку (опору для стоп).
- Для учета изменения антропометрических характеристик пользователя необходима периодическая настройка изделия.
- Существует риск попадания или зажатия в отверстиях между отдельными элементами изделия частей тела пользователя, сопровождающего лица при эксплуатации изделия, а также при сборке и регулировке изделия. Вышеуказанные процедуры должны выполняться с чрезвычайной осторожностью.
- Винты и рукоятки, фиксирующие регулируемые части кресла-коляски должны быть надежно затянуты.
- Не используйте кресло-коляску, если в нем есть дефектные, изношенные или отсутствующие детали.
- Не допускается оставлять пользователя в изделии без присмотра.
- Не допускается использование кресла-коляски для перевозки пользователя в транспортных средствах.
- По соображениям пожарной безопасности кресло-коляску нельзя размещать близко к открытому огню или любому другому сильному источнику тепла.
- Не допускается превышать максимальную нагрузку на изделие.
- Желательно сохранять упаковку. Она может потребоваться при отправке изделия на гарантийный ремонт.
- Оснащение кресло-коляски, наличие, либо отсутствие опций, цвет обивки определяются покупателем при заказе изделия.

Содержание:

1 Введение	4
2 Глоссарий	4
3 Назначение	4
3.1 Информация о потенциальных потребителях и областях применения	4
3.2 Показания к применению	5
3.3 Противопоказания относительные	5
4 Технические характеристики	5
5 Комплектация	7
6 Настройка изделия	8
6.1 Настройка глубины сиденья	8
6.2 Настройка высоты спинки	8
6.3 Настройка положения подлокотников по ширине	9
6.4 Настройка платформы для стоп	10
6.4.1 Настройка высоты	10
6.4.2 Регулировка угла наклона	10
6.4.3 Настройка расположения по ширине раздельных платформ для стоп	11
6.4.4 Настройка положения раздельной платформы для стопы по глубине	11
6.4.5 Настройка угла установки раздельных платформ для стоп	11
6.5 Боковые опоры для тела	12
6.6 Настройка сиденья с функцией изолированного разведения ног	13
6.7 Настройка опоры поясницы	13
7 Эксплуатация изделия	14
7.1 Общие правила эксплуатации	14
7.2 Блокировка колес	14
7.3 Регулировка высоты положения пользователя	15
7.4 Регулировка угла наклона пользователя	16
7.5 Регулировка наклона спинки	17
7.6 Регулировка высоты подлокотника	18
7.7 Регулировка угла наклона подлокотника	18
7.8 Регулировка угла наклона подножки (опоры нижней части ноги)	19
7.9 Регулировка положения подголовника	19
7.10 Установка и регулировка положения стола	20
7.11 Жилет	20
7.12 Держатели для ног (фиксаторы стоп)	21
7.13 Тазовый ремень	22
7.14 Абдуктор	22
8 Уход и техническое обслуживание	23
8.1 Уход	23
8.2 Техническое обслуживание и ремонт	23
9 Гарантия	23
10 Транспортирование и хранение	24
11 Утилизация	24
12 Значение символов	25



1 Введение

Благодарим Вас за выбор кресла-коляски «ЭкзоСит»!

Компания «Экзо Технологии» - разработала и производит для людей с ограниченными возможностями высококачественное изделие, оснащенное всеми необходимыми устройствами поддержания позы и аксессуарами для организации правильной и комфортной позы сидя у пользователя. Наша цель – сделать Вашу жизнь легче, безопаснее и комфортнее!

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на кресло-коляску «ЭкзоСит» по ТУ 30.92.20-002-29664790-2025 с принадлежностями, выпускаемую в пяти типоразмерах: «ЭкзоСит 0», «ЭкзоСит 1», «ЭкзоСит 2», «ЭкзоСит 3», «ЭкзоСит 4».

2 Глоссарий

ЭкзоСит — кресло-коляска инвалидное с принадлежностями.

Пользователь — лицо, поддерживаемое системой сиденья кресла-коляски

Сопровождающий — лицо, не являющееся пользователем, которое управляет креслом-коляской.

Ответственное лицо — физическое или юридическое лицо, несущее ответственность за эксплуатацию кресло-коляски ЭкзоСит, согласно технике безопасности и правилам эксплуатации.

Квалифицированный специалист — физическое лицо или уполномоченный представитель юридического лица, имеющий профессиональную подготовку по эксплуатации кресла-коляски ЭкзоСит, согласно технике безопасности и правилам эксплуатации, подтвержденную действующим сертификатом об образовании.

Представитель производителя — физическое или юридическое лицо, являющееся официальным представителем компании производителя и выполняющее функции: распределение товара от производителя к конечным потребителям; настройка кресло-коляски ЭкзоСит для пользователя; внесения конструкционных изменений, включая ремонт кресло-коляски ЭкзоСит; выполнения иных действий с разрешения компании производителя.

Регулировка — изменение параметров изделия сопровождающим лицом в соответствии с функционалом, предусмотренным комплектацией изделия в процессе использования

Настройка — адаптация изделия к антропометрическим характеристикам пользователя.

3 Назначение

Кресло-коляска ЭкзоСит с принадлежностями – это многофункциональное кресло, которое обеспечивает правильную позу сидя с самого раннего возраста, тем самым способствует профилактике вторичных ортопедических осложнений.

Широкий спектр дополнительных опций и регулировок позволяет оптимально настроить данное кресло под каждого пользователя, а широкий размерный ряд позволяет подобрать его как для маленьких, так и для более взрослых.

3.1 Информация о потенциальных потребителях и областях применения

Кресло-коляска ЭкзоСит предназначено для индивидуального использования инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

ЭкзоСит может применяться в реабилитационных центрах, лечебно-профилактических учреждениях или в быту. Потенциальными потребителями изделия являются пациенты медицинских центров, а также лица, проходящие реабилитацию дома, масса которых не превышает допустимую для соответствующего варианта исполнения.

3.2 Показания к применению

- ДЦП (II – V уровень по шкале GMFCS)
- СМА (1,2,3 тип)
- Spina Bifida
- врожденные мышечные дистрофии
- травма спинного мозга
- ОНМК, ЧМТ
- прочие заболевания, связанные с парезом, параличом, нарушениями опорно-двигательного аппарата
- отсутствие конечности (ампутация)
- полиомиелит

3.3 Противопоказания относительные

- последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении сидя
- выраженный остеопороз
- вывих ТБС с выраженным болевым синдромом
- наличие эпилептических припадков с нарушением сознания

4 Технические характеристики

Кресло-коляска инвалидное «ЭкзоСит» по ТУ 30.92.20-002-29664790-2025 с принадлежностями производится в пяти типоразмерах:

«ЭкзоСит 0»	для пользователей до 5 лет и допустимой нагрузкой 30 кг
«ЭкзоСит 1»	для пользователей от 5 до 7 лет и допустимой нагрузкой 30 кг
«ЭкзоСит 2»	для пользователей от 7 до 12 лет и допустимой нагрузкой 45 кг
«ЭкзоСит 3»	для пользователей от 10 до 15 лет и допустимой нагрузкой 55 кг
«ЭкзоСит 4»	для пользователей от 15 лет и допустимой нагрузкой 65/120* кг

Примечание – вариант отмеченный «*» поставляется по запросу.

Внешний вид и состав изделия приведен на **рис.1**, технические характеристики изделия в зависимости от типоразмера приведены в **таблице 1**.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ4.2.

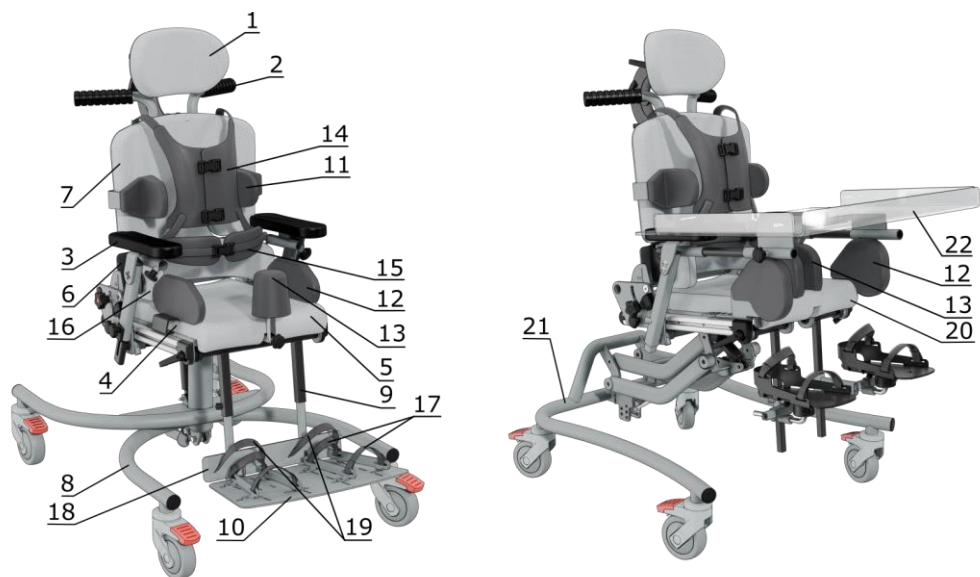


Рисунок 1. Состав кресла-коляски «ЭкзоСит», где 1- подголовник, 2-ручка сопровождающего, 3-подлокотник, 4-сиденье, 5-подушка на сиденье, 6-спинка, 7-подушка для спинки, 8-рама (шасси) на колесах, 9-подножка, 10-платформа для стоп, 11- боковая опора для тела, 12- боковая опора для бедер, 13-абдуктор, 14-жилет, 15-четырёхточечный тазовый ремень, 16-поясничный валик, 17-держатели для ног, 18- упор для пятки, 19-ремень для пятки, 20-сиденье с абдукцией каждой ноги, 21-рама «high-low», 22-стол.

Таблица 1.

Параметр изделия		ЭкзоСит 0	ЭкзоСит 1	ЭкзоСит 2	ЭкзоСит 3	ЭкзоСит 4
Максимальный вес пользователя, кг		30	30	45	55	65/120*
Ширина рамы (B), см		46	46	58	58	58
Длина рамы (L), см		73	73	82	82	82
Ширина сиденья (b), см	min	14	18	18	28	35
	max	27	32	32	38	42
Глубина сиденья (A), см	min	14	18	18	25	30
	max	25	34	34	42/48*	45/51*
Ширина спинки (C), см	min	15	18	18	25	35
	max	32,5	37	37	42	45
Высота спинки (D), см	min	27	32	40	48	53
	max	32	42	50	58	63
Высота подножки (E), см	min	17/14.5*	19	23	30	30
	max	22/16.5*	26	34	46	46

Примечание – вариант отмеченный «*» поставляется по запросу.

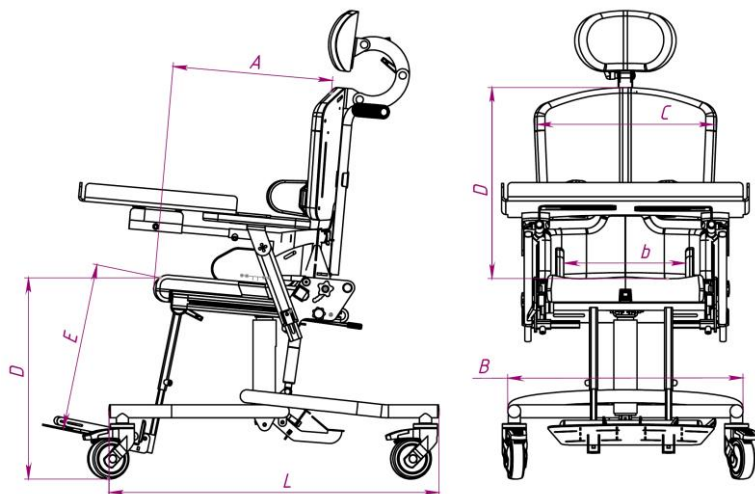


Рисунок 2. Общий вид кресла-коляски «ЭкзоСит».

5 Комплектация

Базовая комплектация кресла-коляски инвалидного «ЭкзоСит» по
ТУ 30.92.20-002-29664790-2025 с принадлежностями:

- Подголовник анатомический, с боковыми опорами для головы - 1 шт.;
- Ручка для сопровождающего - 1 шт.;
- Подлокотник, регулируемый по высоте - 2шт.;
- Сиденье - 1 шт.;
- Подушка на сиденье - 1 шт.;
- Спинка - 1 шт.;
- Подушка для спинки - 1 шт.;
- Рама (шасси) на колесах (колесо заднее - 2 шт. / переднее - 2 шт.: с тормозным механизмом) - 1 шт.;
- Подножка - 1 шт.;
- Платформа для стоп (сплошная) с упором для пятки - 1 шт.;
- Боковая опора для тела (поддержки) - 2 шт.;
- Боковая опора для бедер - 2 шт.;
- Абдуктор - 1 шт.;
- Жилет - 1 шт.;
- 4-х точечный тазовый ремень - 1 шт.;
- Поясничный валик - 1 шт.;
- Держатели для ног (фиксаторы стоп) - 4 шт.;
- Комплект ключей - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации 30.92.20-002-29664790 РЭ - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.

Принадлежности:

- Подлокотник, регулируемый по высоте и углу наклона - 2шт.;
- Ремень для пятки - 2шт.;
- Сиденье с абдукцией каждой ноги (для компенсации длины бедра изолированно) - 1 шт.;
- Шасси (рама) «high-low» - 1 шт.;
- Раздельная платформа для стопы - 2 шт.;
- Подголовник на 3D - креплении - 1 шт.;
- Стол - 1 шт.

6 Настройка изделия

Настройка изделия, должна производиться лицом, изучившим настоящее руководство и прошедшим инструктаж.

УКАЗАНИЕ



- Любые манипуляции по настройке кресла-коляски проводить при заблокированных колесах (см. п.7.2).
- Во избежание неожиданного перемещения придерживайте настраиваемые части свободной рукой.
- Используйте инструмент из комплекта поставки

ВНИМАНИЕ!



- По окончании настройки проверьте плотность затяжки фиксирующих элементов (винтов, рукояток и т.п.). Слабо затянутые детали могут привести к самопроизвольному смещению настраиваемых элементов конструкции и травмированию пользователя.
- Во избежание травм убедитесь, что во время настройки никакие части тела пользователя и лица, осуществляющего настройку не попадают в область перемещения настраиваемых элементов конструкции.

6.1 Настройка глубины сиденья

Для настройки глубины сиденья (1) ослабьте два фиксатора перемещения вращением рукояток (2) против часовой стрелки. Установите нужную глубину сиденья (1), затем плотно затяните фиксаторы вращением по часовой стрелке рукояток (2) (рис.3).

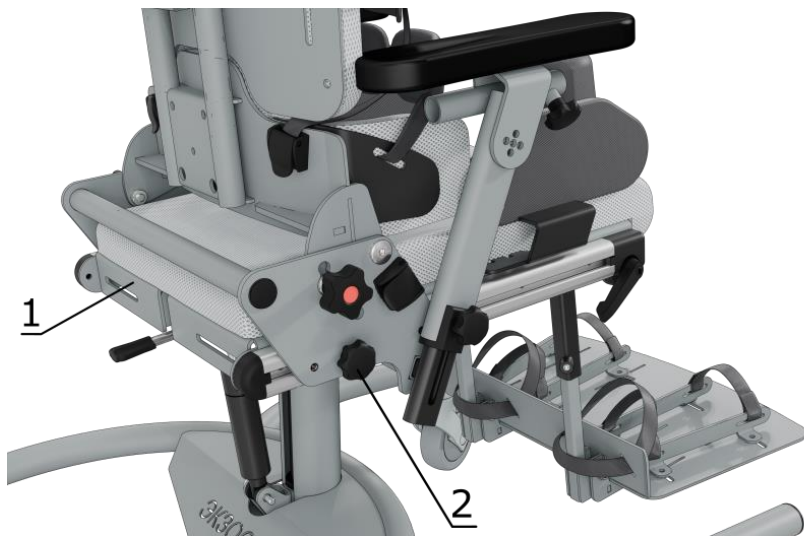


Рисунок 3. Регулировка глубины сиденья.

6.2 Настройка высоты спинки

Для настройки высоты спинки (1) ослабьте фиксатор вертикального перемещения спинки вращая против часовой стрелки рукоятку (2). Установите нужную высоту спинки (1) и придерживая рукой спинку вращением по часовой стрелке плотно затяните рукоятку (2). (рис.4)

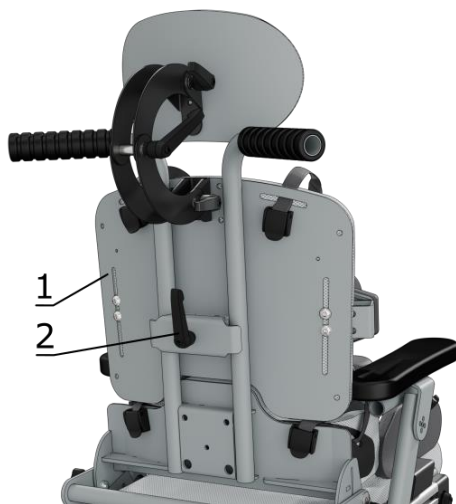


Рисунок 4. Настройка высоты спинки.

6.3 Настройка положения подлокотников по ширине

Настройка подлокотников производится отдельно.

Для настройки положения подлокотника (1) по ширине освободите поперечное перемещение подлокотника вращением против часовой стрелки винта фиксатора (2). Установите нужное положение подлокотника (1) и плотно затяните винт фиксатора (2) вращая его по часовой стрелке (рис.5).

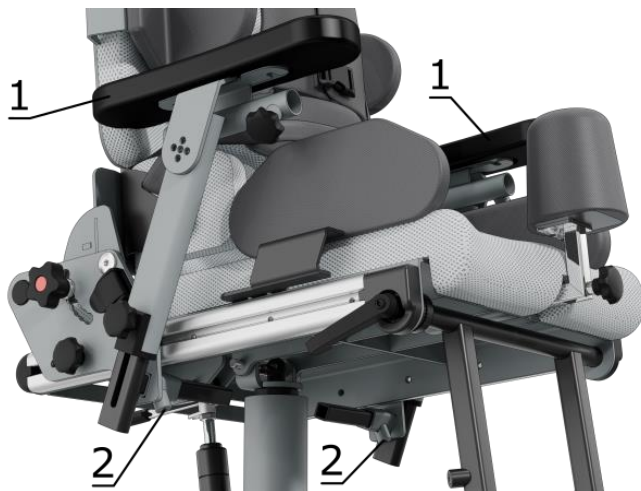


Рисунок 5. Настройка положения подлокотников по ширине

6.4 Настройка платформы для стоп

6.4.1 Настройка высоты

Для настройки по высоте платформы (1) поочередно ослабьте два фиксатора перемещения вращением против часовой стрелки винтов (2). Установите подножку (1) на нужную высоту и поочередно плотно затяните винты фиксатора (2) (**рис.6**).



Рисунок 6. Настройка высоты платформы для стоп.

6.4.2 Регулировка угла наклона

Для установки угла наклона платформы для стоп (1) сложите платформу для получения доступа к регулировочным винтам (2). Вращайте поочередно винты (2) по часовой стрелке для увеличения угла установки платформы и против часовой стрелки для уменьшения угла (**рис.7**).

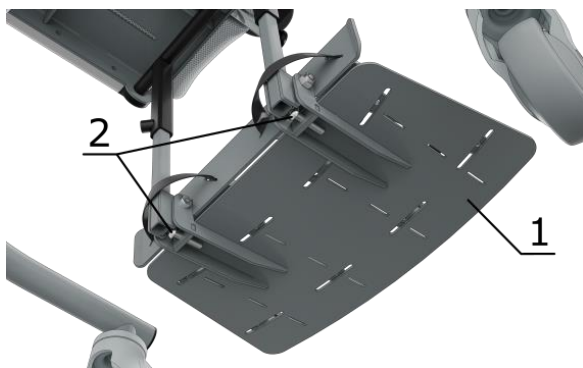


Рисунок 7. Настройка угла наклона платформы для стоп

6.4.3 Настройка расположения по ширине отдельных платформ для стоп

Для настройки положения платформы для стоп (1) по ширине освободите поперечное перемещение платформы вращением против часовой стрелки винта фиксатора (2). Установите нужное положение подножки (1) и плотно затяните винт фиксатора (2), вращая его по часовой стрелке (рис.8).



Рисунок 8. Настройка расположения по ширине отдельных платформ для стоп.

6.4.4 Настройка положения отдельной платформы для стопы по глубине

Для настройки положения отдельной платформы (1) для стопы по глубине вращением против часовой стрелки ослабьте винт (2), фиксирующий продольное перемещение платформы. Установите нужное положение подножки (1) и плотно затяните винт фиксатора (2), вращая его по часовой стрелке (рис.9).

Повторите вышеописанные действия для второй платформы.

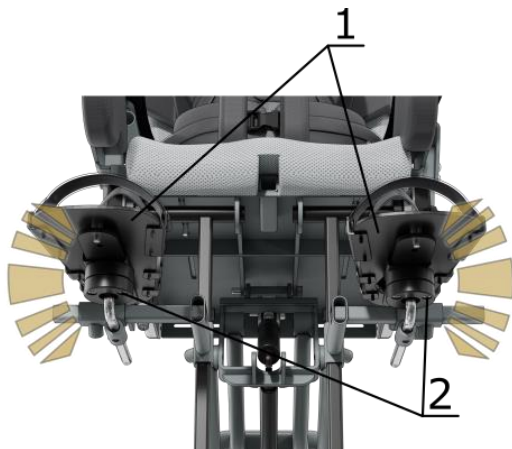


Рисунок 9. Настройка положения отдельных платформ для стоп по глубине.

6.4.5 Настройка угла установки отдельных платформ для стоп

Для установки угла наклона платформы для стоп (1) ослабьте фиксацию шарнира поочередным вращением против часовой стрелки винтов (2). Установите платформу (1) в нужном положении и поочередно вращением против часовой стрелки плотно затяните винты (2) (рис.10).

Повторите вышеописанные действия для второй платформы.



Рисунок 10. Настройка угла установки отдельных платформ для стоп.

6.5 Боковые опоры для тела

Боковые опоры (левая и правая) настраиваются отдельно.

Для настройки положения боковой опоры (1) по ширине и высоте разблокируйте ее перемещение, вращением против часовой стрелки винтов фиксатора (2). Установите опору (1) в нужное положение и вращением по часовой стрелке плотно затяните винты фиксатора (2). (рис.11)

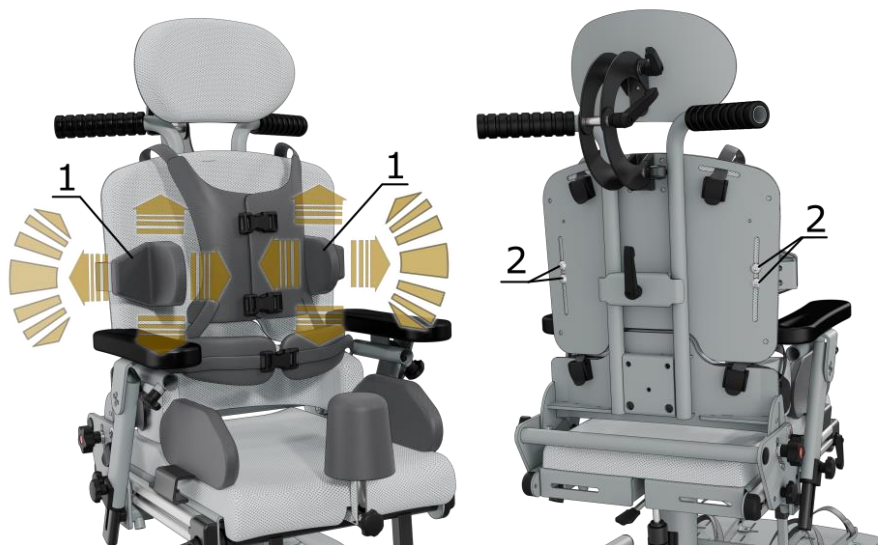


Рисунок 11. Настройка положения боковых опор для тела.

6.6 Настройка сиденья с функцией изолированного разведения ног.

Для регулировки боковых опор для бедра (1) по ширине и установки нужной абдукции ног снимите мягкую подушку (2) с сиденья (3). Вращением против часовой стрелки ослабьте фиксирующие винты (4) и установите опоры (1) в нужное положение. Придерживая опоры (1), вращением по часовой стрелке плотно затяните винты (4). Установите подушку (2) обратно на сиденье (3). Для компенсации разницы длины бедра – необходимо одну из дополнительных пластин сиденья отрегулировать на нужную глубину, зафиксировать винт.(рис.12)

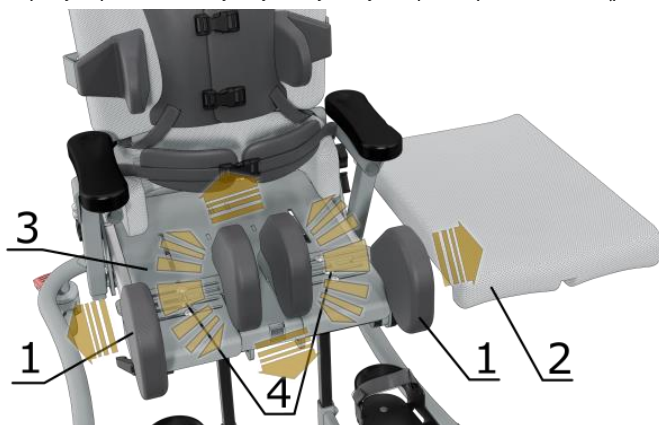


Рисунок 12. Регулировка боковых поддержек бедра.

6.7 Настройка опоры поясницы

Снимите поясничный валик (1). Затем, ослабив фиксирующие винты (2), вращением против часовой стрелки, установите нужное положение опоры (1). Плотно затяните фиксирующие винты (2) вращением по часовой стрелке и верните поясничный валик (1) на место (рис.13).

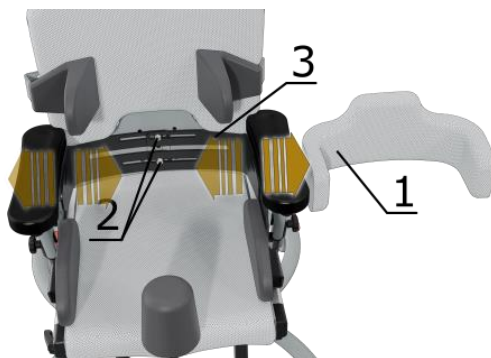


Рисунок 13. Настройка опоры поясницы.

7 Эксплуатация изделия.

7.1 Общие правила эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделие должно быть настроено под антропометрические параметры пользователя.

Эксплуатация, включая регулировку изделия, должна осуществляться лицами, изучившими настоящее руководство.

Перед началом и во время эксплуатации сопровождающее лицо обязано:

- проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках;
- не разгонять кресло-коляску слишком быстро, не менять резко направления движения;
- не оставлять пользователя в изделии без присмотра, даже если колеса изделия заблокированы;
- следить, чтобы руки, колени и локти пользователя не задевали дверных проемов, дверных косяков, иных препятствий;
- не отпускать кресло при движении по поверхности с уклоном;
- не наклонять кресло вперед;
- проводить регулярные осмотры кресла;
- проверять температуру поверхности изделия перед помещением в него пользователя.



ВНИМАНИЕ!

Любые манипуляции, в том числе регулировку, с кресло-коляской производить при заблокированных колесах.

Порядок посадки пользователя в кресло-коляску:

- заблокируйте колеса кресла-коляски;
- поместите пользователя в кресло;
- затяните удерживающие ремни (сначала на туловище, затем на ногах).



УКАЗАНИЕ

Перед началом движения убедитесь, что все колеса разблокированы.

Высадка пользователя осуществляется в обратной последовательности.

7.2 Блокировка колес

Для блокировки колеса (1) нажмите на рычаг блокировки (2) до фиксации в нижнем положении. Для разблокировки колеса поднимите рычаг блокировки в исходное положение. (рис.14)

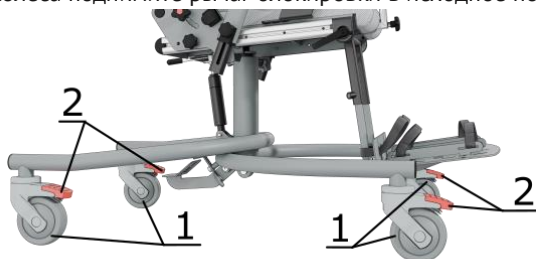


Рисунок 14. Блокировка и разблокировка колес.

ВНИМАНИЕ!



- Во избежание травм убедитесь, что во время регулировки никакие части тела пользователя и лица, осуществляющего регулировку, не попадают в область регулировки.
- По окончании регулировки необходимо проверить, чтобы все элементы регулировки были плотно затянуты. Слабо затянутые детали могут привести к самопроизвольному смещению регулируемых элементов конструкции и тем самым травмировать пользователя, либо сопровождающее лицо.

7.3 Регулировка высоты положения пользователя

Для изменения высоты положения пользователя базового основания нажмите ногой на педаль разблокировки (1) и потяните рукоятки ручки сопровождающего (2) в требуемом направлении (вверх или вниз) (рис.15). При достижении необходимого положения отпустите педаль (1).



Рисунок 15. Регулировка высоты положения пользователя.

Для изменения высоты сиденья с шасси «high-low», одновременно нажмите на правый рычаг разблокировки (1) и потяните за рукоятки ручки сопровождающего (2) в требуемом направлении (вверх или вниз) (рис.16). При достижении необходимого положения отпустите рычаг (1).



Рисунок 16. Регулировка высоты положения пользователя

7.4 Регулировка угла наклона пользователя

Для установления угла наклона пользователя в изделии с базовым шасси, одновременно нажмите на рычаг разблокировки (1) и потяните за рукоятки ручки сопровождающего (2) в требуемом направлении (вверх или вниз) до достижения нужного угла (рис.17). При достижении необходимого положения отпустите рычаг разблокировки (1).



Рисунок 17. Регулировка угла наклона пользователя.

Для установления угла наклона пользователя в изделии с шасси «high-low» одновременно нажмите на левый рычаг разблокировки (1) и потяните за рукоятки ручки сопровождающего (2) в требуемом направлении (вверх или вниз) до достижения нужного угла (рис.18). При достижении необходимого положения отпустите рычаг разблокировки.



Рисунок 18. Регулировка угла наклона пользователя.

7.5 Регулировка наклона спинки

Для регулировки наклона спинки вращением против часовой стрелки выверните рукоятки (1) до разблокировки ее перемещения, установите спинку в нужном положении, совместив резьбовое отверстие в спинке и отверстие в соответствующем пазе основания вверните и плотно затяните вращением по часовой стрелке рукоятки (1) (рис.19).



Рисунок 19. Регулировка наклона спинки.



УКАЗАНИЕ

В процессе регулировки придерживайте спинку свободной рукой.

7.6 Регулировка высоты подлокотника

Регулировка производится для каждого подлокотника отдельно.

Для регулировки высоты подлокотника ослабьте фиксатор поворотом против часовой стрелки рукоятки (1) до разблокировки вертикального перемещения подлокотника, установите нужную высоту, затем плотно затяните фиксатор поворотом по часовой стрелке рукоятки (1). (рис.20)

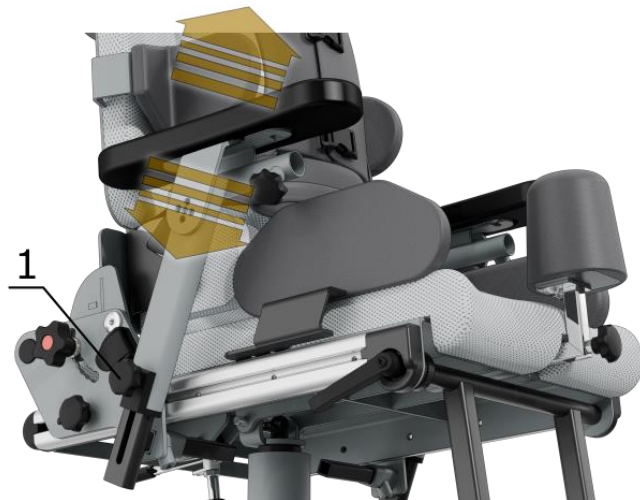


Рисунок 20. Регулировка высоты и угла наклона подлокотника.

7.7 Регулировка угла наклона подлокотника

Для регулировки угла наклона подлокотника ослабьте фиксатор поворотом против часовой стрелки рукоятки (2) до разблокировки поворота подлокотника, установите нужный угол наклона, затем плотно затяните фиксатор поворотом по часовой стрелке рукоятки (2). (рис.21)



Рисунок 21. Регулировка угла наклона подлокотника.

Регулировка производится для каждого подлокотника отдельно.

7.8 Регулировка угла наклона подножки (опоры нижней части ноги)

Для изменения угла наклона подножки разблокируйте фиксатор углового перемещения поворотом против часовой стрелки рукоятки (1). Установите нужный угол наклона и удерживая опору свободной рукой, плотно затяните фиксатор поворотом по часовой стрелке рукоятки (1) (рис.22).

Для отдельных платформ для стоп регулировка подножки проводится последовательно для каждой ноги.

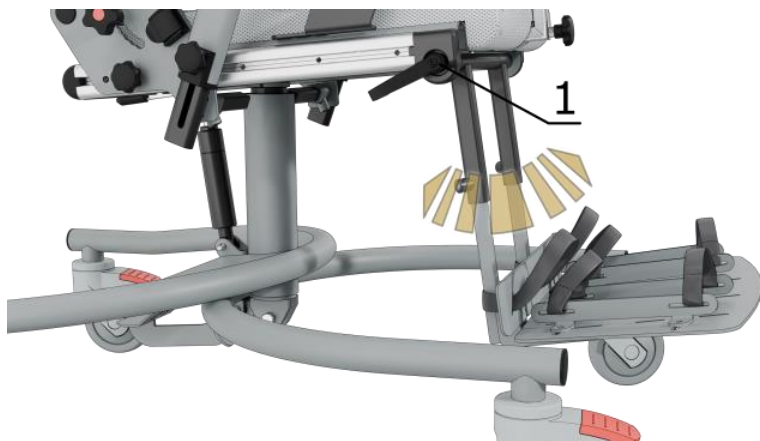


Рисунок 22. Регулировка угла наклона подножки.

7.9 Регулировка положения подголовника

Подголовник имеет возможность перемещения в вертикальном и продольном направлениях. Для регулировки положения подголовника вращением рукояток (1) против часовой стрелки ослабьте фиксацию шарниров крепления подголовника, одновременно удерживая подголовник свободной рукой. Установите подголовник в нужное положение и удерживая его свободной рукой плотно затяните шарниры крепления вращением рукояток (1) по часовой стрелке. (рис.23)

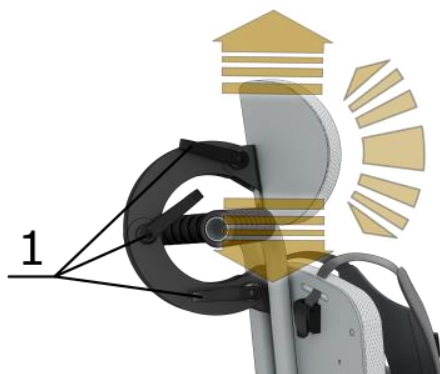


Рисунок 23. Регулировка положения подголовника.

7.10 Установка и регулировка положения стола

Для установки стола установите направляющие столешницы (1) в кронштейны (2), и плотно затяните ручки-барашки (3) (**рис.24**)

Демонтаж стола производить в обратном порядке.

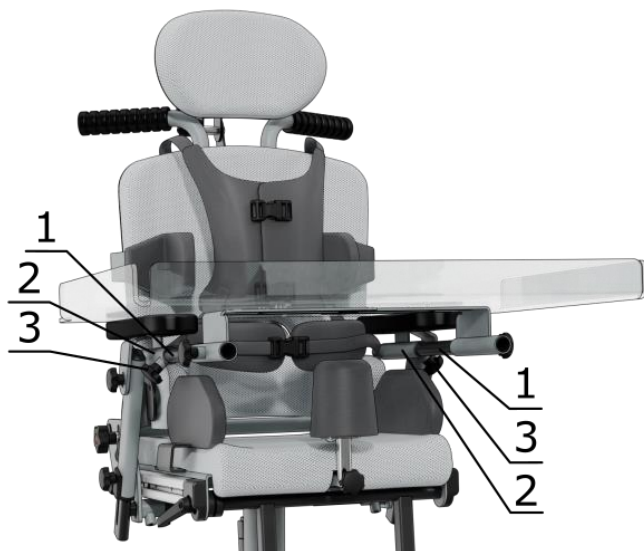


Рисунок 24. Установка и регулировка положения стола.

Для регулировки высоты установки стола разблокируйте по очереди вертикальное перемещение подлокотников (см. **п.7.6**).

Установите нужную высоту столика и придерживая столик свободной рукой, поочередно плотно затяните поворотом по часовой стрелке рукоятки (1) (**рис.20**).

Для регулировки угла установки столика (доступно только с регулируемыми по углу наклона подлокотниками) разблокируйте поворот подлокотников (см. **п.7.7**).

Установите нужный угол наклона столика и плотно затяните поворотом по часовой стрелке рукоятки (2) (**рис.21**).

Для регулировки положения столика в продольном направлении ослабьте фиксаторы перемещения столика вращением против часовой стрелки ручек-барашек (3). Установите нужное положение столика и плотно затяните фиксаторы вращением ручек-барашек (3) по часовой стрелке (**рис.24**).



УКАЗАНИЕ

Во избежание неожиданного перемещения придерживайте стол свободной рукой.

7.11 Жилет

Для установки жилета (1), проденьте лямки жилета (2) в специальные крепежные элементы (3), установленные на спинке кресло-коляски (**рис.25**).

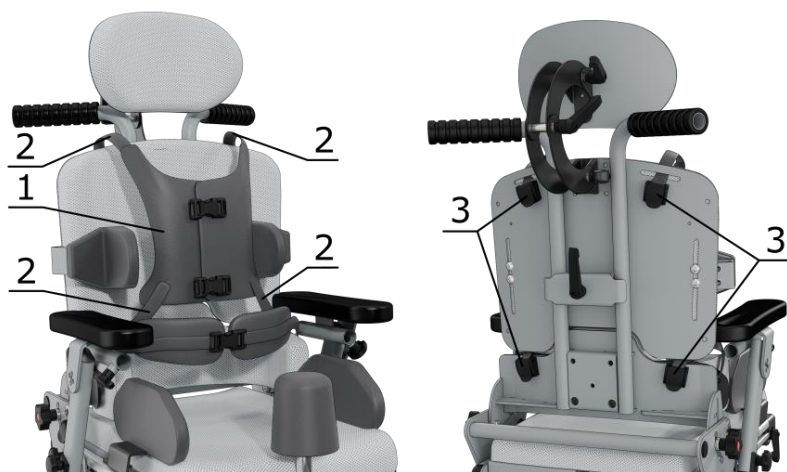


Рисунок 25. Жилет.

7.12 Держатели для ног (фиксаторы стоп)

Фиксаторы стоп (1) установлены на платформе отдельно для каждой стопы. При использовании фиксаторы (1) затягиваются на стопах пользователя до нужной степени фиксации (рис.26).



Рисунок 26. Держатели для ног.

7.13 Тазовый ремень

Для установки тазового ремня (1), проденьте лямки (2) в специальные крепежные элементы (3), установленные на спинке кресло-коляски (рис.27).

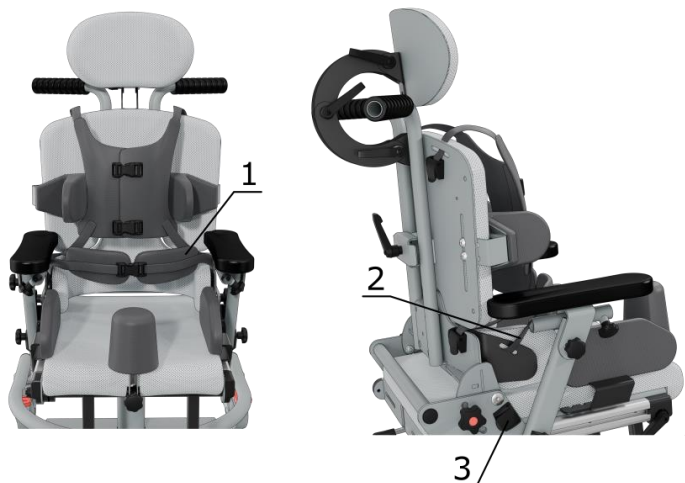


Рисунок 27. Тазовый ремень.

7.14 Абдуктор

Для регулировки глубины установки абдуктора (1), ослабьте фиксатор перемещения вращением против часовой стрелки рукоятки (2). Установите нужную глубину и плотно затяните фиксатор вращением рукоятки (2) по часовой стрелке. (рис.28)



Рисунок 28. Абдуктор.

Для демонтажа абдуктора после ослабления фиксатора извлеките абдуктор из направляющей.

8 Уход и техническое обслуживание

8.1 Уход

Материал покрытия кресло-коляски «ЭкзоСит» не вызывает раздражения кожи. Изделие необходимо содержать в чистоте и использовать в соответствии с руководством пользователя.

- Покрытие и тканевые элементы следует чистить влажной салфеткой. Разрешается применение мягкодействующих моющих средств, при необходимости допускается чистка при помощи пылесоса или мягкой щетки.
- После чистки все элементы должны быть хорошо просушены при комнатной температуре.
- Очищайте раму и комплектующие кресла-коляски, используя неагрессивные моющие средства
- Не допускается применение моющих средств, содержащих абразивы, химически активные вещества.
- Не допускается машинная стирка тканевых элементов.
- Необходимо периодически проверять колеса рамы на наличие разного рода загрязнений, а при обнаружении их удалять. Скопление грязи и пыли на колесах рамы может затруднить перемещение кресла-коляски, привести к ускоренному износу и поломке колес.
- Изделие не является водонепроницаемым. Не допускается прямой контакт изделия с водой.



ВНИМАНИЕ!

Не допускается применение чистящих средств, содержащих растворители или масляные компоненты.

8.2 Техническое обслуживание и ремонт

Необходимо проверять изделие на предмет повреждений при каждом использовании. В случае обнаружения неисправности, повреждений или деформации каких-либо элементов, необходимо срочно обратиться в специализированный сервисный центр или дилеру компании.

Необходим бережный и надлежащий уход за изделием для его длительной и безопасной эксплуатации.

Для проведения ремонтных работ необходимо обращаться только к предприятию-изготовителю или в специализированный сервисный центр. В ходе ремонта допускается применение только оригинальных запчастей.



ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание устройства необходимо проводить не реже 1 раза в год квалифицированным специалистом и должно включать в себя обзор безопасности кресло-коляски – проверку состояния элементов, подвижных при эксплуатации, блокировке и регулировке. Своевременное техническое обслуживание обеспечивает длительную и безопасную эксплуатацию кресло-коляски.

9 Гарантия

- Производитель гарантирует, что данное кресло-коляска инвалидное с принадлежностями «ЭкзоСит» соответствует требованиям технических условий на изделие, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правильной транспортировки, ухода и хранения.
- Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты поставки изделия, в зависимости от условий заключенного государственного контракта, или со дня получения изделия пользователем.



- Гарантийный срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя составляет 2 года с момента изготовления.
- Срок эксплуатации изделия – 6 лет.
- Производитель в течение гарантийного срока эксплуатации обязуется безвозмездно устранять дефекты и/или осуществлять замену деталей, если повреждения не были вызваны нарушением правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Ремонт изделия осуществляется только предприятием-изготовителем или специализированным сервисным центром.
- При обнаружении следов несанкционированного вскрытия и/или наличия механических повреждений производитель снимает с себя ответственность по гарантийным обязательствам, установленным настоящим руководством пользователя.

10 Транспортирование и хранение

- Транспортирование и хранение изделия должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58522.
- Транспортирование изделия может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта. Крепление упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны осуществляться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
- При транспортировании самолётом – в отапливаемом герметизированном отсеке.
- Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования.
- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 80%).
- Условия хранения в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 20°C до плюс 50°C и относительной влажности до 98%).

Не допускается хранить изделия в помещении, где находятся испаряющиеся жидкости и вещества, которые могут вызвать коррозию.

11 Утилизация

- Утилизация кресло-коляски инвалидное с принадлежностями «ЭкзоСит» и комплектующих должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учета и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.3684. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор, требуется специальная сортировка компонентов.
- Согласно СанПиН 2.1.3684 кресло-коляска относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.
- Перед утилизацией изделие должно быть подвергнуто дезинфекции.
- Кресло-коляска подлежит утилизации в следующих случаях:
 - окончание срока эксплуатации;
 - порче изделия, исключающей возможность ремонта.
- Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Бумага, полиэтилен и пластик должны быть утилизированы по отдельности.

12 Значение символов

Символ	Значение
	«Обратите внимание»
	«Информация»
	«Изготовитель»
	«Дата изготовления»
	«Обратитесь к инструкции по применению»
	«Беречь от воздействия огня»
	«Предел температуры»
	«Диапазон влажности»
	«Беречь от влаги»
	«Хрупкое. Осторожно»
	«Верх»

vk.com/exobot



@EXO_TECHNOLOGY_

Наши контакты:

☎ +7 (495) 481-32-28

✉ info@exo-technology.ru

🌐 www.exo-technology.ru

Наш адрес:

125212, город Москва,
Кронштадтский бульвар, дом 7а,
строение 2, помещение II,
комната 13.

